

Flect'EXPERT

PATCH GAULTHÉRIE

Flect'Expert Patch Gaulthérie est un patch à double action issu de la thermothérapie et basé sur la technologie Hydrogel. Le patch procure immédiatement un effet froid puis un effet chaud qui soulage durablement les tensions musculaires en procurant une confortable chaleur sur les zones douloureuses.

Sa structure douce et confortable protège la zone douloureuse et par la présence d'hydrogel, sa teneur élevée en eau permet un retrait facile et indolore du patch.

INDICATIONS

Flect'Expert Patch Gaulthérie protège les zones du corps affectées par des douleurs rhumatismales et musculaires, des lombalgies ou torticolis et soulage les symptômes douloureux résultant de traumatismes et de contusions, y compris suite aux activités sportives.

PRÉSENTATION

Boîte contenant 5 patchs (10 x 14 cm) emballés dans un sachet refermable, avec un filet de maintien.

FORME ET COMPOSITION

Chaque patch contient :

VBE (vanillyl-butyl-éther), menthol, huile de gaulthérie (dérivé salicylé), gélatine, povidone K90, solution de sorbitol à 70 %, kaolin, dioxyde de titane, propylène glycol,

méthylparahydroxybenzoate, propylparahydroxybenzoate, édétate de sodium (EDTA), acide tartrique, carmellose sodique (CMC), glycinat d'aluminium, 1,3-butylène glycol, polysorbate 80, polyacrylate de sodium, eau purifiée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Patch conforme et découpable : il s'adapte facilement aux différentes zones du corps.

1. Nettoyer et sécher la zone concernée.

2. Enlever le film protecteur du patch.

3. Appliquer le patch sur la zone concernée, en le découpant éventuellement pour lui donner la forme et la dimension adéquates.

4. Sur les zones du corps où l'application peut être plus difficile (genoux, coudes, chevilles, poignets...), le patch peut éventuellement être maintenu sur la surface à traiter au moyen du filet de maintien inclus dans la boîte.

5. Laisser le patch en place sur la zone à traiter, jusqu'à disparition de la sensation bénéfique. Pour retirer le patch, soulever un bord et tirer délicatement.



La durée de l'effet froid puis chaud est subjective, et cet effet se dissipe de toute façon au bout de quelques heures.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser plus d'un patch de Flect'Expert Patch Gaulthérie par application.

Ne pas utiliser Flect'Expert Patch Gaulthérie si l'emballage est endommagé.

Le produit doit uniquement être appliqué sur une peau intacte et saine et ne doit pas être porté durant le bain ou la douche. Ne pas appliquer sur les yeux ou autour de ceux-ci, ni sur les muqueuses.

Ne pas utiliser le produit en même temps que d'autres traitements topiques éventuellement appliqués sur la zone à traiter.

En cas de doute au sujet de l'utilisation de Flect'Expert Patch Gaulthérie, consultez votre médecin.

Pour usage externe uniquement. Ne pas avaler.

Les patchs contenus dans la boîte de Flect'Expert Patch Gaulthérie sont destinés à un usage unique et ne peuvent être réutilisés. Une fois utilisé, éliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

CONTRE-INDICATIONS

Flect'Expert Patch Gaulthérie ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs composants. Ne pas utiliser sur une peau endommagée, indépendamment du type de lésion.

FRÉQUENCE D'UTILISATION

Utiliser Flect'Expert Patch Gaulthérie en cas de besoin et laisser le patch en place sur la zone à traiter, jusqu'à disparition de la sensation bénéfique.

Flect'EXPERT

PATCH
GAULTHÉRIE

IBSA

(F)/155)
1224 Ed. V/06.22

GROSSESSE : il n'existe aucun lien entre l'utilisation de Flect'Expert Patch Gauthérie et la survenue d'effets indésirables pendant la grossesse ou d'éventuelles malformations chez le nouveau-né. Toutefois, l'utilisation de Flect'Expert Patch Gauthérie n'est pas recommandée pendant la grossesse, à moins d'une nécessité absolue. Dans ce cas, adressez-vous à votre médecin qui pourra vous conseiller.

INTERACTIONS

À ce jour, aucune interaction entre les composants de Flect'Expert Patch Gauthérie et d'autres médicaments n'a été rapportée.

CONSERVATION

Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration indiquée sur l'emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri de la lumière du soleil et à l'écart de sources de chaleur.



IBSA Pharma SAS
Parc de Sophia-Antipolis
Les 3 Moulins - 280, rue de Goa
06600 ANTIBES - France

Date de la dernière révision de la notice : **Juin 2022**



Dispositif Médical



Attention : consulter les précautions d'emploi



Date limite d'utilisation



Code de lot



Ne pas réutiliser



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Consulter les instructions d'utilisation



Fabricant



Séparez les éléments avant de trier